


## ミンバラックス - 前歯審美部位抜歯用インスツルメント

ミンバラックスは周囲骨壁をいためないように歯周靭帯を切断し非外傷的抜歯を可能にします

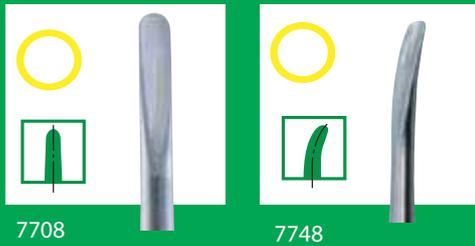

7708

7748



7746

7747

商品名		価格(円・税別)
ミンバラックス	7708	12,000
ミンバラックス	7748	12,000
ミンバラックス	7746	12,000
ミンバラックス	7747	12,000
ミンバラックス	7600MIN(セット)	55,000

## 使用方法(例)



7746または7747を使用し靭帯組織を切断します




歯牙または根がルーズになれば適切なインスツルメントを選択し、注意深く骨膜上に挿入します



7708と7748を使用し近遠心靭帯組織を切断します



抜歯鉗歯などで残根を除去してください

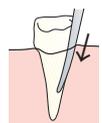

注意:  
挿入することにより歯牙を浮き上げさせるように使用してください。また、エレベーターのようにテコの原理でこねるような使用はしないでください。

写真提供: Dr. Schnutenhaus, Germany